

Portant le nom du dieu du vent oriental, qui prodiguait une pluie bénie sur les champs de céréales dans la mythologie antique, la gamme Eurus incarne notre volonté de proposer des produits de qualité japonaise, d'une grande fiabilité, aux dentistes d'Europe et du reste du monde.

Espace compact

Espace de travail

Le fauteuil, doté d'un repose-jambes pliant et d'une tablette praticien montée sur sa base, a une longueur totale nettement plus courte que les unités comparables. Cela convient aux cliniques qui recherchent un gain de place.

La combinaison de l'unité montée sur la base et du repose-jambes rabattable offre aux dentistes et aux assistantes un espace opératoire plus confortable. Le positionnement de la tablette praticien et de la tablette assistante derrière le fauteuil soulage l'anxiété du patient car il n'est pas exposé aux instruments dentaires. Pour les patients, la fonction rotative du crachoir permet aux personnes âgées de se rincer la bouche facilement. Cela permet également un accès facile pour l'entretien et le nettoyage.



Le positionnement de la tablette praticien derrière le fauteuil permet aux assistantes de se préparer lors des consultations.



Le crachoir pivote vers l'extérieur à 90°, ce qui permet aux assistantes de se tenir debout à 3 ou 4 heures, ce qui crée une large zone disponible pour différents soins.

Léger comme l'air

Avec un système de freinage pneumatique, le bras d'équilibrage améliore la mobilité et la flexibilité pendant les procédures dentaires. La tablette praticien très maniable et légère réduit la fatigue pour les dentistes. Cette tablette praticien peut être déplacée avec un minimum d'effort.





Confort et relaxation

Fauteuil

Le mécanisme hydraulique assure un mouvement doux et silencieux des articulations et procure une sensation de confort aux patients. Le nouveau repose-nuque à double articulations, capable d'effectuer une grande variété de réglages, peut être ajusté par paliers de 7,5 degrés, afin de s'adapter aux patients, enfants comme adultes.

La hauteur du repose-nuque peut être ajustée facilement, ne nécessitant que la moitié de la force requise sur les modèles précédents, ce qui est plus confortable pour le dentiste ou son assistante lors du réglage du fauteuil en fonction de la morphologie du patient.

Le fauteuil a une faible hauteur initiale avec une capacité de charge de 165 kg. Il est facile d'y monter et descendre, pour les enfants, les patients âgés et les patients en fauteuil roulant. Il permet au dentiste/assistant dentaire d'examiner la dentition du patient à partir de la position 6 heures et convient à la thérapie orthodontique.



Joysticks au fauteuil

Le fauteuil peut être entièrement manipulé de manière intuitive, hygiénique et sans les mains, en utilisant uniquement le pied de l'opérateur.



Repose-nuque électrique

Avec son débattement de 120 mm, et son réglage de l'angulation au niveau de l'atlas, le repose-nuque électrique Belmont facilite le positionnement en douceur et sans stress pour le patient.

Les joysticks situés aux pieds de l'opérateur permettent un réglage mains libres de l'angulation et de la hauteur du repose-nuque, tout en préservant l'hygiène.

Du bas vers le haut

Tablette praticien sur bras

La plage de mouvement verticale de la tablette est 770-900mm.
La tablette repose sur un bras ajustable.



Poignée adaptée à l'utilisation de l'écran tactile
La poignée est conçue non seulement pour la préhension, mais aussi pour fournir une position ergonomique et de repos à la main afin de réduire l'effort et d'assurer un fonctionnement fiable de l'écran tactile.



Position du support carquois (Holder)
Le support, peut être ajusté librement avec un mécanisme de réglage à trois axes pour la position la mieux adaptée à chaque dentiste.




Guides-cordons
Le mouvement de roulement en douceur des rouleaux libère le dentiste du poids du tuyau lorsqu'il décroche l'instrument.
Cette conception de l'unité lui permet de pratiquer les soins pendant une longue durée, sans ressentir la moindre fatigue.


Configurer votre style

Interface tactile

L'interface utilisateur a été conçue pour améliorer l'efficacité et réduire le stress pendant les soins. Lorsqu'un instrument est décroché et sélectionné, l'écran affiche uniquement les informations nécessaires pour cet instrument.

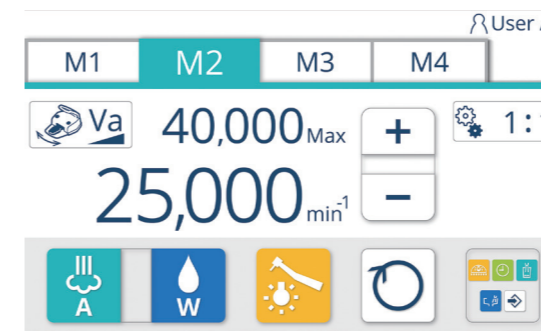

Micromoteur
L'écran de paramétrage des micromoteurs permet de stocker quatre réglages différents, pour une utilisation plus intuitive. Le nombre de tours / minute, le couple et le sens de rotation peuvent être choisis d'une simple pression sur l'écran.

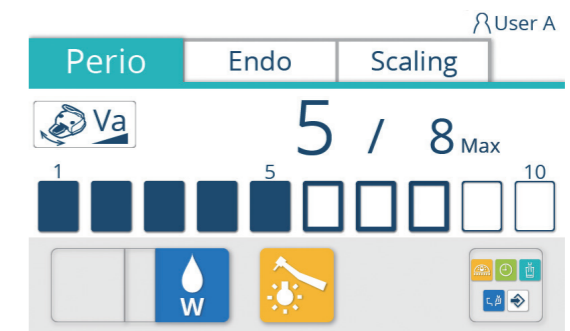

Détartreur
À partir de l'écran de réglage du détartreur, les modes de traitement (paro, endo, détartrage) peuvent être sélectionnés d'une seule pression sur l'écran.



Pédale à variation latérale
La nouvelle pédale de commande permet une utilisation précise par réglage horizontal pour la variation d'intensité et vertical (ON/OFF) pour le déclenchement. La puissance maximale peut être réglée pour les instruments de manière rapide et intuitive.

Qualité

Crachoir

L'espace intérieur a été agrandi pour un crachoir de grande capacité. Avec le séparateur, un haut niveau d'hygiène peut être maintenu.



Indicateur lumineux

L'unit est livré avec un indicateur lumineux de sécurité qui indique clairement l'état des sécurités du fauteuil et des instruments, aidant ainsi le dentiste / l'assistante dentaire à connaître intuitivement l'état de l'unit.



Système d'aspiration

Le fauteuil est livré avec un système d'aspiration dont le débit a été augmenté de 185%, permettant une aspiration rapide et fiable.

Le système peut être adapté aux aspirations doubles, ce qui peut s'avérer utile pour les procédures chirurgicales.

Amélioration des performances de nettoyage

Rester propre

Les conditions d'hygiène à l'intérieur de l'unit sont maintenues par le rinçage des conduites d'eau, de sorte qu'un traitement adapté puisse être administré aux patients. L'unit peut être livré avec un séparateur ou un séparateur avec collecteur d'amalgame, ce qui contribue à faciliter son entretien quotidien.



Support autoclavable

Les manchons côté dentiste et assistante peuvent être autoclavés et retirés pour le nettoyage.



Système de nettoyage de ligne d'aspiration **Option**

L'utilisation quotidienne du système de nettoyage par aspiration intégré empêche l'accumulation de débris dans les conduits d'aspiration et aide à maintenir une aspiration constante.



Composants de l'éclairage amovibles **Option**

Les poignées autoclavables de l'éclairage et le cache-lentilles peuvent être retirés par l'action d'un simple levier.



Système de rinçage **Option**

Le système de rinçage intégré des instruments prévient l'accumulation de biofilm et la prolifération bactérienne dans les tuyaux des instruments.



Bouteille d'eau **Option**

De l'eau propre est disponible pour les instruments et le remplissage du gobelet grâce à une bouteille d'eau fixée sous la table du médecin.

Puissance et précision

Nouvel éclairage

Le scyalitique LED de nouvelle génération (conforme à la norme ISO9680), capable d'émettre de la lumière avec une intensité variable de 5,000 à 34,000 lux, reproduit la lumière naturelle avec une grande capacité fonctionnelle de rendu des couleurs. Avec le capteur sans contact, l'éclairage peut être allumé et éteint et le mode composite peut être activé.



Eclairage polyvalent

Le bras long et compensé de l'éclairage Belmont permet de le déplacer aisément tout autour de la zone buccale, rendant possible l'éclairage des zones maxillaires et mandibulaires du patient, le troisième axe réduisant les ombres portées.

Nuancier

Coloris Euris

Les coloris se déclinent en quatre thèmes: chaud, froid, terre et vitaminé. Trois types de selleries sont disponibles: finition Standard (sans coutures), finition Confort et finition Premium (avec coutures).

Chaud						
	Coral Pink	Light Pink	Beige	Camel	Bordeaux	Black
Froid						
	Mint Blue	Indigo Blue	Light Blue	Purple	Light Gray	Gray Teal
Terre						
	Rose	Mauve	Forest	Aldo Blue	Ash Gray	Chocolate
Vitaminé						
	Scarlet Red	Mandarin Orange	Lemon Yellow	Yellow Green	Sky Blue	Blue



Un vaste choix de configurations

Variantes

Avec ses concepts au design épuré, fluide et ergonomique, la série Eurus propose un vaste choix de sièges opérateurs, de fauteuils et d'units dentaires, conçus pour répondre aux exigences de chaque individu. Nous sommes fiers de fabriquer des équipements faciles à utiliser, non seulement pour les dentistes mais aussi pour leurs assistantes avec toujours à l'esprit le confort des patients.



S6 Standard

[Fauteuil]
Fauteuil Chaise
[Type d'unit]
Crachoir sur fauteuil et Tablette praticien montée sur la base du fauteuil
Crachoir sur fauteuil et Concept Cart
[Type de support pour instruments]
Holder (Carquois) / Place type
[Eclairage]
Eclairage scyalitique LED sur unit



S6 VacPac

[Fauteuil]
Fauteuil Chaise
[Type d'unit]
VacPac et Tablette praticien montée sur la base du fauteuil
VacPac et Concept Cart
[Type de support pour instruments]
Holder (Carquois) / Place type
[Eclairage]
Eclairage scyalitique LED sur unit



S6 Sans crachoir

[Fauteuil]
Fauteuil Chaise
[Type d'unit]
Tablette praticien montée sur la base du fauteuil
Concept Cart
[Type de support pour instruments]
Holder (Carquois) / Place type
[Eclairage]
Eclairage scyalitique LED sur unit

